


ご注意ください！！

ショックボタンが無いAEDがあります！！

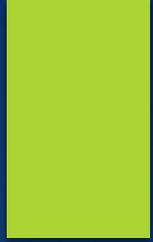

1. ショックボタンを有するAEDとオートショックAEDの相互点

(1) ショックボタンを有するAED

患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要否が判断されます。除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流れ、ショックボタンを押すよう音声ガイドが流れる。患者に接触している人がいないことを確認した後、救助者がショックボタンを押すことによって、除細動ショックが実施されます。

(2) オートショックAED

患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要否が判断されます。除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流れ、カウントダウン（例：スリー、ツー、ワン）又はブザーの後に、除細動ショックが実施されます。

2. オートショックAEDの使用上の注意点

救助者等が除細動ショックの際に患者から離れることが遅れた場合、当該救助者等が放電エネルギーにより感電するおそれがありますので、ご注意ください！！